

製造番号

保管用

# 取扱説明書

保証書付

## ルルド シェイプアップリボンチャージ AX-KXL5202

### もくじ

安全上のご注意	1・2
各部の名称	3
ご使用前の準備	4
ご使用方法	5・6
保管・お手入れのしかた	7
故障かなと思ったら	8・9
別売品	10
廃棄するときは	11
仕様／アフターサービス	12
保証書	裏表紙

このたびはAX-KXL5202をお買上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。なお、この取扱説明書には保証書がついています。お読みになられたあとも、大切に保管してください。

ATEX

## 安全上のご注意 必ずお読みください。

いずれも安全に関する重要な内容ですので必ず守ってください。



### 警告

人が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容。



禁止

- 次の人は使用しないでください。
  - ・ 使用部位の肌に傷など異常のある人
  - ・ 体内埋（植え）込み型および装着型の医用電気機器（ペースメーカー、心電計など）を使用している人
  - ・ 幼児や小さいお子様
  - ・ 自分で意思表示のできない方や身体の不自由な人
  - ・ 医師に運動を禁じられている人
- 次のような部位には使用しないでください。
  - ・ 首、顔、頭の部分
  - ・ 胸部及び心臓の近く
  - ・ 粘膜、ひじ、ひざなどの関節
  - ・ 傷口や傷跡、整形手術をした部位や当日に脱毛処理をした部位
  - ・ にきびや吹出物で皮膚炎症を起こしている部分
  - ・ 生理中の腹部
- 他の治療器や美容機器、電気製品とは併用しないでください。
- 運動目的以外の使い方はしないでください。
- 改造や分解、修理はしないでください。
- 故障を発見したり、身体に異常を感じた時は使用しないでください。
- 通電中、ジェルシートに金属を接触させないでください。
- 1日1か所につき1回(5分)以上使用しないでください。



必ず守る

- 次の人は使用前に医師に相談してください。
  - ・ 悪性腫瘍のある人
  - ・ 心臓に障害のある人
  - ・ 妊娠初期の不安定期から出産直後までの人
  - ・ 糖尿病などによる高度な末しょう（梢）循環障害による知覚障害のある人
  - ・ 体温38度以上（有熱期）の人
  - ・ 安静を必要とする人
  - ・ 脊椎の骨折、捻挫、肉離れなど、急性〔とう（疼）痛性〕疾患の人
  - ・ 血圧に異常のある人
  - ・ アレルギー体質、皮膚病およびアトピー性皮膚炎、敏感肌や接触性皮膚炎など、皮膚に既往症のある人

 **注意**

人が障害を負う可能性及び、  
物的損害の発生が想定される内容。



禁止





- 浴室などの湿度の高いところで使用しないでください。
- 高温下や火気の近くで使用、保管しないでください。
- 本体に水などの液体をかけないでください。
- 本体を曲げたり、落としたり、強いショックを与えないでください。
- 汗をかいたり、水分や油分の残った肌には使用しないでください。
- 飲酒時、喫煙中、就寝時、入浴時には使用しないでください。
- 濡れた手で本体、USBケーブル、ジェルシートを触らないでください。
- USBケーブルが傷んだり充電口がゆるい時は使用しないでください。
- 充電口に触れたり金属類をさし込まないでください。



必ず  
守る

- ジェルシートを貼る、はがす時は必ず電源を切ってから行ってください。
- 3ヶ月に一度は充電してください。
- 付属のUSBケーブルは本品の充電用途のみに使用してください。

# 各部の名称

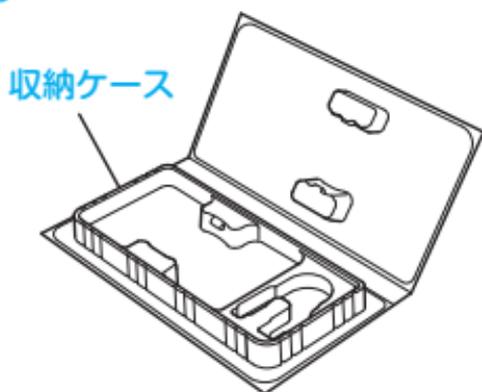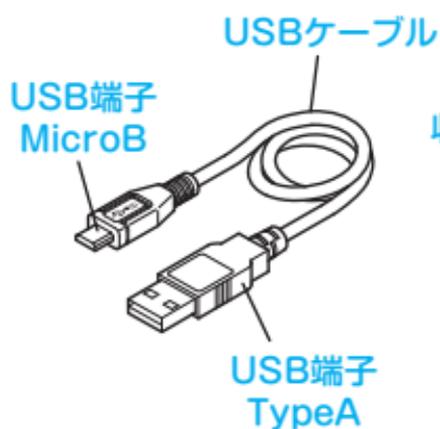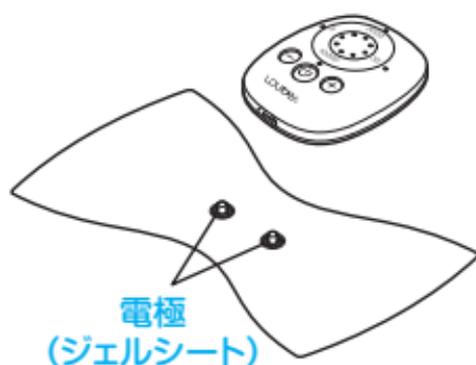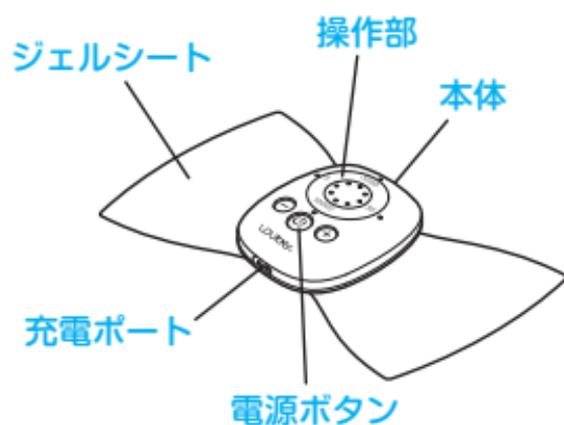

## 付属品


本体	.....	2 個
ジェルシート*	.....	2 枚
USB ケーブル	.....	1 個
収納ケース	.....	1 個
取扱説明書	.....	1 枚

※ジェルシートは消耗品です。粘着面が傷んだ時は、別売品をお求めください。

## ご使用前の準備

STEP  
1

USBケーブルのMicroB端子を本体の充電口に差し込みます。USBケーブルのTypeA端子をパソコン等のUSBポートに差し込みます

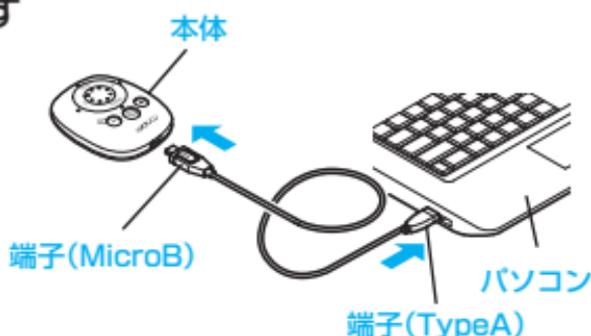


●USBケーブルは根元まで差し込んでください。

STEP  
2

充電を開始します

操作部のLEDが点滅します。

LEDの点滅が点灯に変わると充電が完了です。

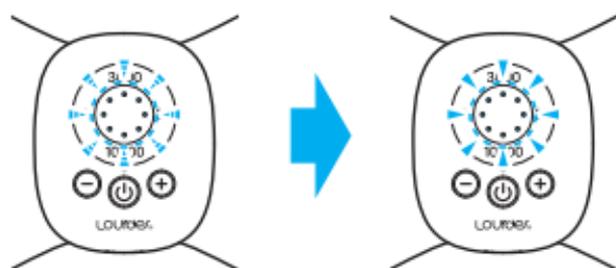

- ①パソコンに電源が入っていないとUSBポートから電力が供給されません。  
※一部のパソコンでは、供給するものがあります。
- ②家庭用コンセントからUSB電源出力に変換できるACアダプターもご利用いただけます。
- ③お手持ちのUSB電源出力対応モバイルバッテリーでもご利用いただけます。  
※②③ともに定格出力が電圧5Vで、電流は500mA以上のものを使用。  
※②③ともに使用する機器の取扱説明書をよく読み注意に従ってください。

●約2時間の満充電で、合計約3時間使用できます。

※使用する環境、負荷によって使用時間は異なります。

※高い周囲温度の中で充電を行うと保護装置が働き、充電が途中で止まる場合があります。

※使い始めや長時間使用しなかった時は満充電してください。

# ご使用方法

STEP  
1

収納ケースから取り出し、フィルムをはがす

STEP  
2

使用部位に貼る


ジェルシートを使用部位に貼りつけます。

- ・ジェルシートは左右の粘着面全面を皮膚に密着させてください。
- ・満充電されている状態から約3時間使用できます。

 **注意**

- ・貼る前に電源を入れないでください。指先に通電すると強い痛みを感じます。
- ・貼る部位の汗や水分をふき取ってください。

使用部位

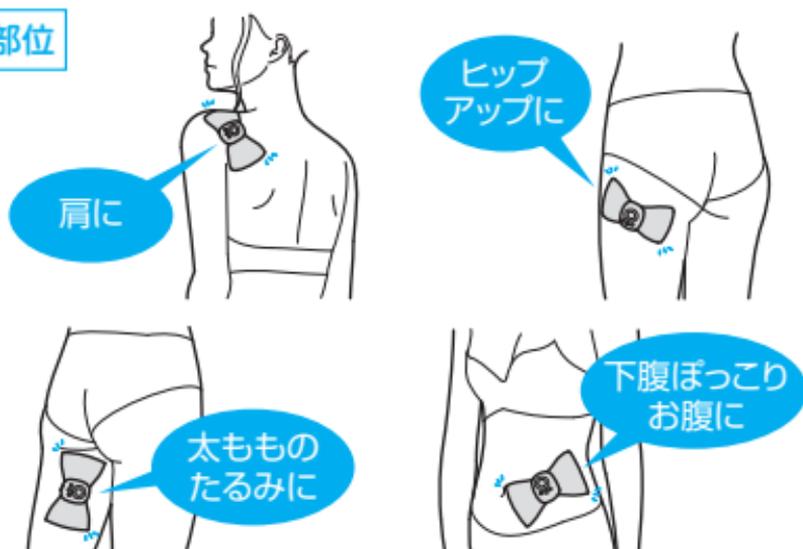

 **注意**


- ・お肌に異常が生じていないかよく注意してご使用ください。本品の使用によって発しん、発赤、かゆみなどの症状があらわれた時は直ちに使用を中止し、医師に相談してください。

STEP  
3

電源を入れる

電源ボタンを押してください。

- ・強度レベル1を表すLEDが点灯します。
- ・3Hzモード、強度レベル1の状態からスタートします。

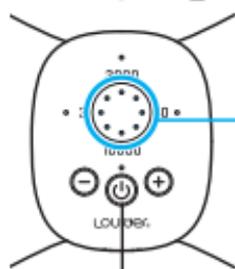

強度ランプ

強度レベル1

⋮

強度レベル8

# ご使用方法

## STEP 4

### モード、強度レベルを選ぶ

本体のボタンを押すと下記のように変化します。

- ・使用しているモードに応じてモードランプが点灯します
- ・調整した強度に応じて強度ランプが点灯します (1~8個)
- ・初めてお使いのときは強度レベル1からお試ください。

### 3Hzモード

3Hzに切り換えます

モードランプ  
(3Hz)

### 10000Hz モード

10000Hzに  
切り換えます

モードランプ  
(10000Hz)


### 3000Hzモード

3000Hzに切り換えます

モードランプ  
(3000Hz)

30Hzモード  
30Hzに  
切り換えます

モードランプ  
(30Hz)

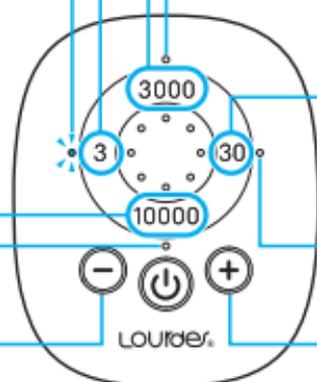

### 強度レベルー

押すごとにレベルが  
下がります

レベルは最小が1で段階に  
応じてLEDが点灯します

### 強度レベル+

押すごとにレベルが  
上がります

レベルは最大が8で段階に  
応じてLEDが点灯します

## STEP 5

### 電源を切る

電源ボタンを押してください。

- ・約5分後にタイマーが作動し、自動的に電源が切れます。

## STEP 6

### ジェルシートを身体からはがす



注意

- ・必ず電源を切ってからがしてください。指先に通電すると痛みを感じます。
- ・ジェルシートを無理に引っ張ったり一部だけを持ってはがさないでください。

# 保管・お手入れのしかた

## 保管方法

### 収納ケースに貼る

- ・ ジェルシート同士を接触させないでください。



### ⚠ 注意

- ・ 3ヶ月に1度は充電してください。
- ・ 温度-10℃～60℃、湿度20～85%RHの環境で保管してください。
- ・ ケース内は清潔に保ってください。
- ・ 直射日光の当たる場所、高温、多湿、水気の近くは避けて保管してください。
- ・ 小さなお子様やペットが触られる場所に保管しないでください。

## お手入れ方法

### ⚠ 注意

- ・ お手入れは必ず電源を切ってから行ってください。
- ・ 本体を水洗いしないでください。
- ・ シンナー、ベンジン、アルコールなどは使用しないでください。

## 本体のお手入れ

- ① 本体が傷付かないよう柔らかい布で汗や湿気を丁寧に拭き取ってください。
- ② 汚れた場合はぬるま湯で希釈した中性洗剤に柔らかい布をひたし、よく絞ってから表面の汚れを丁寧に拭き取ってください。

## ジェルシートのお手入れ

ジェルシートの粘着面が汚れて貼りつきにくくなったら、下記の手順でお手入れしてください。

- ① 指先に水滴をつけてジェルシートの粘着面をこすり、汚れを取り除いてください。
- ② 十分に水をきって、粘着面を上にし、風通しの良い日陰で自然乾燥させてください。



## ジェルシートの交換

### ⚠ 注意

- ・ ジェルシートは消耗品です。粘着面が傷んだ時は、別売品をお求めください。

- ① ジェルシートを押さえ、本体を引っ張って取り外す。
- ② ジェルシートの電極と、本体にある2ヶ所の電極をはめて取付ける。  
※電極が確実にハマっているか確認してください。



## 故障かなと思ったら

### 電源が入らない

充電が不十分、または充電が切れていませんか？  
正しく充電してください。

充電中ではありませんか？  
充電中は使用できません。

本体とジェルシートの接続が不十分ではありませんか？  
本体とジェルシート(電極)を正しく接続してください。

### 電源がすぐ切れる

充電が不十分、または充電が切れていませんか？  
正しく充電してください。

ジェルシートを肌に貼っていますか？  
肌に正しく貼りつけてから電源を入れてください。

ジェルシートが乾燥していませんか？  
粘着面を少量の水でお手入れしてください。

### 充電できない

長期間保管し電池が放電しきっていませんか？  
完全放電すると使用できませんので3ヶ月に1度は充電してください。

### 電気刺激を感じない

電源は入っていますか？  
電源ボタンを押してください。

ジェルシートが本体から外れていませんか？  
2ヶ所の電極を確実に取り付けてください。

ジェルシートが肌に密着していますか？  
左右の粘着面を肌に密着させてください。

ジェルシートの粘着面が傷んでいませんか？  
新しいジェルシートに交換してください。

ジェルシートの粘着面がゴミやホコリで汚れていませんか？  
ジェルシートのお手入れに従って粘着面を洗浄してください。

### 電気刺激が弱い

レベル設定が低くありませんか？

+ボタンを押し、レベルを上げてください。

電池残量が少なくなっていますか？

充電してください。

ジェルシートの粘着面が傷んでいませんか？

新しいジェルシートに交換してください。

ジェルシートの粘着面がゴミやホコリで汚れていませんか？

ジェルシートのお手入れに従って粘着面を洗浄してください。

### 電気刺激が強い

レベル設定が高くありませんか？

-ボタンを押し、レベルを下げてください。

ジェルシートが肌に密着していますか？

左右の粘着面と肌の間に隙間がないように貼り付けてください。

### 電気刺激が途中で止まる

5分以上使用していませんか？

タイマーが働き、自動停止しますが故障ではありません。

## 別売品

ジェルシートは消耗品です。粘着面が傷んだときは、弊社別売品をお求めください。

純正品以外のジェルシートは使用しないでください。

純正品以外を使用して発生したトラブルについては、一切の責任を負いかねますので予めご了承ください。

純正品の購入に関しては、お買い上げの販売店、または(株)アテックスお客様ご相談窓口(裏表紙参照)まで、お問い合わせください。

販売名：ルルド シェイプアップリボンチャージ  
専用ジェルシート  
品番：AX-KXL5203



# 廃棄するときは

## ■リチウムイオン電池のリサイクルについてお願い



Li-ion00

本製品は、リチウムイオン電池を内蔵しています。リチウムイオン電池はリサイクルすることができる大切な資源ですので、リサイクルにご協力をお願いいたします。本製品を廃棄する時は、お住まいの市区町村の指導に従ってください。

- 廃棄するときは、電池を分解しないでください。
- 本製品は、一般家庭ごみとして廃棄しないでください。廃棄されたリチウムイオン電池が、ごみ収集車などで破壊されてショートし、発火、発熱の原因になります。

## ■リチウムイオン電池の取り出しかた

製品を廃棄するとき以外には絶対に分解しないでください。



**警告**

下記の手順は、製品を破棄するためのものであり修理用のものではありません。ご自分で分解した場合、機能が維持できず、故障または事故の原因になります。


- 充電残量がある場合は、電池を使い切ってください。
- ドライバーを用い、次の手順で分解してください。

① 本体電源ボタン真下付近の溝にマイナスドライバーを差し込み開けます。

② 基板を留めているねじを外します。

③ 基板の裏にある電池のコードをニッパでマイナスの黒いコードから切ります。

④ 電池を取り外します。

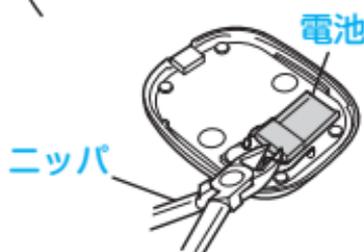

- 取り出した電池は、⊕と⊖の端子をショートさせないように注意し、端子部にテープを貼り絶縁してください。

## 仕様

販売名	ルルド シェイプアップリボンチャージ
品番	AX-KXL5202
サイズ	本体：(約)W45×L55×H15(mm) ジェルシート：(約)W145×L85(mm) USBケーブル長：約200mm
重量	約30g(本体+ジェルシート 1セット分)
タイマー	約5分自動オフ
電源電圧	DC5V(リチウムイオン電池)
内蔵電池	60mAh
充電時間	約2時間
連続使用時間	約3時間
素材	本体：ABS樹脂 ジェルシート：ポリウレタン、PET、カーボン
出力周波数	(約)3/30/3000/10000Hz
使用環境温湿度	0℃～40℃ 20～85%RH
保管環境温湿度	-10℃～60℃ 20～85%RH
生産国	中国

※本製品は医療機器ではありません。

## アフターサービス

- 1 保証書は必ず「お買上げ年月日」と「販売店名」など、所定事項の記入および記載内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。
- 2 保証期間は、お買上げ日より1年間です。保証期間中に修理を依頼されるときは保証書をご提出のうえ、お買上げの販売店に修理をご依頼ください。
- 3 保証期間経過後の修理につきましては、修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
- 4 弊社は「ルルド シェイプアップリボンチャージ」の補修用性能部品の最低保有期間を、製造打切後最低3年間としています。性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。
- 5 保証期間中の修理などアフターサービスについてご不明な点は、お買上げの販売店、または下記に明記しておりますカスタマーサービス課までお問い合わせください。

## 保証書

本製品は厳密な検査を経て出荷されたものです。  
お客様の正常な使用状態で万一故障した場合は、保証書に記載された期間、下記保証規約により無料修理をお約束いたします。  
修理は必ず本書を添えてご依頼ください。



株式会社アテックス

〒547-0014 大阪市平野区长吉川辺3-3-24

TEL : 06-6799-8100 (代) FAX : 06-6799-8118

品名/型番	ルルド シェイプアップリボンチャージ/ AX-KXL5202		
お買上げ年月日*	年	月	日
保証期間	お買上げ日より1年 本体		
★ お客様	お名前 <span style="float:right">様</span>		
	ご住所		
	TEL:(        )        -		
★ 販売店			

★ 欄に記入のない場合、本書は無効となることがありますので、必ず記入の有無をご確認ください。

**保証規約** 本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

- 保証期間中であっても以下の理由またはこれに準ずる理由により生じた故障などについては本保証書は適用されません。
  - 取扱上の不注意、誤った使用方法
  - 天災、火災などによる故障または損傷
  - お買上げ後の転居等による輸送、移動、落下など
  - 保存上の不備
  - 弊社または弊社の指定した事業所以外で行われた修理、改造
  - 本製品本来の使用目的以外の使用
  - 一般家庭以外(例えば業務用の長時間使用、車両、船舶への搭載)に使用された場合の故障または損傷
- 運賃諸掛り費用は原則としてお客様にてご負担願います。
- 無料保証期間はご購入の日から1年です。
- 保証の適用されない破損および保証期間経過後の故障については、有料で交換いたします。
- 保証書の再発行はいたしません。
- 本書のご提示がない場合や無料保証期間を過ぎた場合は、有料交換になります。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。

**アテックスお客様ご相談窓口** 受付時間 平日9:00~17:00  
土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く

修理・使い方・お手入れなどのご相談、お問い合わせは

**0120-486-505**

よくある質問、メールでのお問い合わせは  
ホームページを活用ください

<https://www.atex-net.co.jp/>

株式会社アテックス 大阪物流センター 〒595-0074 大阪府泉津市小津島町6-11